

KUTYA DNS mintavételi útmutató

Egyedvizsgálat: A kutya DNS profiljának meghatározását jelenti. Az egyed DNS profilja az élete során nem változik, így a tenyészállatok esetében egy vizsgálat szükséges, ez az eredmény a később vizsgálandó utódokhoz is megfelelő.

Származásellenőrzés: A kutya apjának (kan), anyjának (szuka) és az utód DNS profiljának összehasonlítását jelenti.

A DNS vizsgálat elvégzéséhez a laboratórium alvadásban gátolt vért (EDTA, Heparin) kér. Tenyészállatoknál minden esetben és a világfajtáknál a származás ellenőrzéshez a kölyökkutyától is!

A mintavételt a kutya chipszámának ellenőrzésével állatorvos végezheti, illetve a tenyésztőszervezet által kijelölt személy, aki aláírásával és pecséttel hitelesíti a mintavételt. A mintavétel során feltétlenül szükséges a mintavételi csövek megjelölése a későbbi azonosíthatóság érdekében. *Felhívjuk a figyelmet a jelölések fokozott ellenőrzésére, különösen a teljes almoknál történő mintavételnél!*

A **Magyar ebfajtáknál** kölyökkutyáktól elfogadott minták a következők:


- alvadásban gátolt vér (EDTA, Heparin) –javasolt!
- szájnyalkahártya kaparék

Tenyészállatok mintavétele: A vérvételhez 2-5 ml alvadásban gátolt (EDTA, Heparin) vérminta szükséges. A mintavétel után szükséges a cső átforgatása!


Kölyköktől a mintavétel:

-Amennyiben megoldható, a tenyészállatokkal megegyező módon alvadásban gátolt (EDTA, Heparin) vérminta levétele a vizsgálat szempontjából a legmegfelelőbb.

Ehhez a laboratórium biztosítani tud egy kis mennyiségű (600µl) vérminta vételéhez alkalmas kapilláris elvén működő vérvételi szerelék. A minták jelölésénél ajánlott a kupakok sorszámozása is!

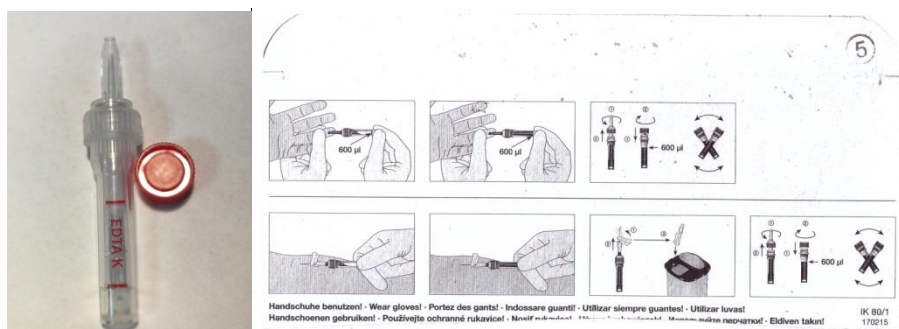

- A szájnyalkahártya kaparék gyűjtése mintavételi tamponnal az alábbiak szerint történjen: A kutya száját kinyitva mindkét oldalon 8-10-szer, körkörös mozdulattal, a nyelet forgatva dörzsölje meg a tamponnal a szájüreg belső felületét (a fogsoron kívül, a pofa belső oldalán) és helyezze a Laboratórium által biztosított, tartósítószert tartalmazó folyadékba, majd a perforációnál törje bele a tampon nyelét.

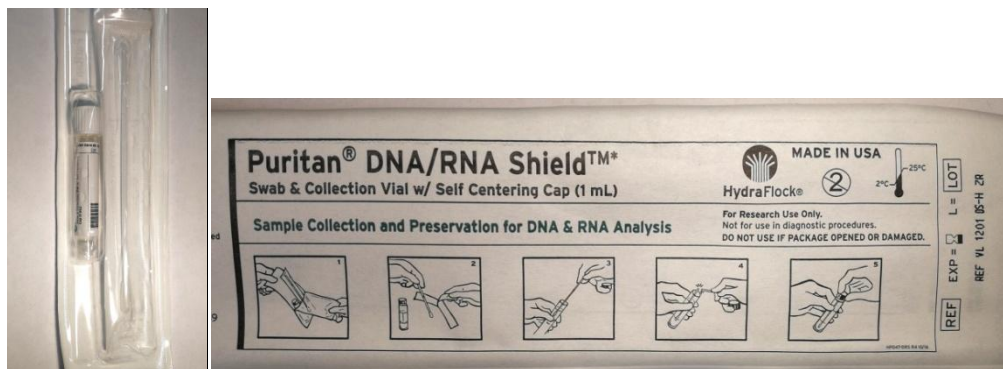

A vizsgálat díja 8661 Ft+ÁFA

A Magyar ebfajták esetében a NÉBIH állami költségvetési támogatásból finanszírozza, így a tenyésztő számára **ingyenes!**

A mintákat az alábbi kísérőirattal kell beküldeni:

Egyedvizsgálat:

<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/378228/Kutya+DNS+egyedvizsg%C3%A1lat+k%C3%A9r%C5%91+lap.pdf/f2305ed1-3cf9-3c95-f92b-ae18d6c22166>

Származásellenőrzés:

<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/398672/Vizsg%C3%A1latk%C3%A9r%C5%91+lap.pdf/4ba025a2-875c-6e6b-7ee8-3ad8fa361be4>

Duál fedeztetésnél kérjük, mindkét kanra töltsék ki a vizsgálatkérő lapot!

A kitöltés után kérjük a kitöltött PDF dokumentumot nyomtassa ki, a **megrendelő/kötelezettségvállaló írja alá** és csatolja a mintákhoz!

A mintákat a kísérő nyomtatvánnyal együtt juttassa el az alábbi címre:

NÉBIH, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Állatgenetikai Laboratórium

1143 Budapest, Tábornok u.2.